



PROCEDURES DE CONNEXION POUR L'ENVOI D'EMPREINTES NUMERIQUES AU LABORATOIRE

Comptes « Laboratoire Dentaire Michel Gourdy SAS »
Email : info@gourdy.com / WeTransfer si besoin
Compatibilité tous fichiers STL, PLY, OBJ, DCM



Connectez-vous sur le portail **3Shape Communicate**, rechez le laboratoire dans l'onglet « Connections » et cliquez sur « Connect »



Connectez-vous sur le portail **Sirona Connect Case Center**, recherchez le laboratoire dans la section « Partenaires » at ajoutez-nous dans vos « Destinataires favoris »



Connectez-vous sur le portail **CS Connect**, recherchez le laboratoire dans l'onglet « Quick Connect » et cliquez sur « Ajouter ce partenaire »



Connectez-vous sur le portail **Medit Link**, rechrchez le laboratoire dans l'onglet »Partenaires » et cliquez sur « Faire la demande de partenariat »



Contactez votre **support iTero** et indiquez leur l'adresse email info@gourdy.com pour qu'il réalise la connexion



Dans **Planmeca Romexis**, sélectionnez le cas et cliquez sur « Cloud Export ». Sélectionnez alors le contact « info@gourdy.com », cochez « Send to another Planmeca Romexis » et cliquez sur « Send ». Nous recevrons automatiquement le cas dans **Romexis LabApp**